



Anvendes, når en patient udviser manglende tegn på liv, hvilket indikeres ved:

- Bevidstløshed; og
- Manglende normal vejtrækning; og
- Manglende puls eller tegn på cirkulation.

Hvis en patient er under otte år eller vejer under 25 kg, bør ZOLL AED PLUS bruges sammen med ZOLL AED PLUS-pædiatriske elektroder. Behandlingen bør ikke forsinkes, fordi patientens nøjagtige alder eller vægt skal fastslås.

### KONTRAINDIKATIONER FOR BRUG

Må IKKE anvendes, når patienten:

- Er bevidst; eller
- Trækker vejret; eller
- Har en konstaterbar puls eller andre tegn på liv.

### BRUGER

Den eksterne defibrillator ZOLL AED PLUS er beregnet til anvendelse af personer, der er uddannet i brugen af ZOLL AED PLUS-enheden, grundlæggende førstehjælp, udvidet førstehjælp, eller personer, der på anden måde er godkendt af en lægelig myndighed til at defibrillere patienter med hjertestop i en nødsituation. HLR-overvågningsfunktionen omfatter en metronom, der er beregnet til at hjælpe førstehjælpere med at udføre 100 brystkompressioner i minuttet, hvilket er den frekvens, der anbefales af den amerikanske hjerteforening (American Heart Association (AHA)) og Det Europæiske Genoplivningsråd (ERC). Stemmemeddelelser og tekstmeddelelser tilråder en kompressionsdybde på 3,8-5,1 cm for voksne patienter. HLR-overvågningsfunktionen er ikke beregnet til brug på patienter, der er under otte år.



ZOLL Medical Corporation

269 Mill Road  
Chelmsford, MA 01824-4105  
+1 978-421-9655 • +1 800-348-9011

www.zoll.com